

Návod k použití

	<p style="text-align: center;">1. Odběr vzorků</p> <p>Umístěte Rovers Cervex-Brush ® na endo-cervikální kanál. Jemně zatlačte kartáč proti děložnímu čípku. Udržujte jemný tlak, tyčinku držte mezi palcem a ukazováčkem a otočte kartáč pětkrát ve směru hodinových ručiček.</p>
	<p style="text-align: center;">2. Zachování celého vzorku</p> <p>Zatlačením palce na zadní stranu kartáčku jednoduše odpojte celý kartáč z tyčinky do konzervačního média.</p>
	<p style="text-align: center;">3. Označení lahvičky</p> <p>Umístěte víčko na lahvičku a utáhněte. Označte lahvičku a žádanku jménem a / nebo číslem pacienta, jménem lékaře a datem v případě potřeby.</p>
	<p style="text-align: center;">4. Pošlete lahvičku do laboratoře</p> <p>Umístěte lahvičky a žádanky do sáčku a odešlete do laboratoře.</p>

Upozornění: Cervex-Brush ® by neměl být používán v prvních 10 týdnech těhotenství u těhotných pacientek.

Cervex-Brush ® je registrovaná ochranná známka společnosti .

Zdroj:

http://www.roche-diagnostics.cz/download/pcr/cervex_brush_navod_k_pouziti.pdf