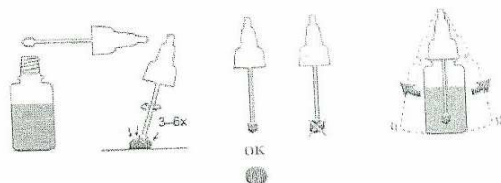


ŽÁDANKA NA VYŠETŘENÍ FOB

Poř. číslo: _____

(vyšetření okultního krvácení ve stolici v rámci screeningu kolorektálního karcinomu)

Jméno, příjmení:	
Rodné číslo:	Pojišťovna:
Bydliště:	
Datum odběru:	
Datum vystavení žádanky:	Podpis lékaře: (razítko)

Návod k odběru vzorku

- Otevřete lahvičku.
- Krouživým pohybem odeberte vzorek ze tří až šesti míst stolice pomocí tyčinky, ukotvené ve víčku lahvičky. Ujistěte se, že na tyčince ulpělo vhodné množství stolice. Dostačující je množství velikosti kuličky černého pepře. Nadbytečné množství vzorku může ucpat filtr ve víčku lahvičky. Pozor, řidší vzorky stolice nemusí na tyčince ulpět dobře.
- Tyčinku vsuňte zpět do lahvičky a pečlivě uzavřete víčko. Důkladně promíchejte vzorek v lahvičce s roztokem.
- Lahvičku s odebraným vzorkem uchovávejte vždy v temnu při teplotě 2 - 25°C (např. v lednici).
- Lahvičku doneste svému lékaři nejpozději druhý den po odběru.

HODNOCENÍ LABORATOŘE:


FOB vyšetření:	
datum:	podpis:

GYNEKO spol. s r.o.,
Klinická laboratoř společnostiSmetanova 954, 755 01 Vsetín
IČO: 47681268, Tel.: 571 415 089 - 90**ŽÁDANKA NA VYŠETŘENÍ FOB**

Poř. číslo: _____

(vyšetření okultního krvácení ve stolici v rámci screeningu kolorektálního karcinomu)

Jméno, příjmení:	
Rodné číslo:	Pojišťovna:
Bydliště:	
Datum odběru:	
Datum vystavení žádanky:	Podpis lékaře: (razítko)

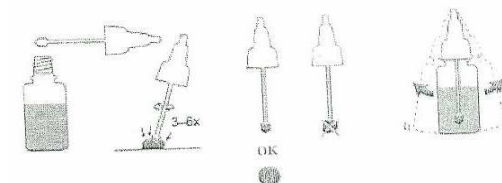Návod k odběru vzorku

- Otevřete lahvičku.
- Krouživým pohybem odeberte vzorek ze tří až šesti míst stolice pomocí tyčinky, ukotvené ve víčku lahvičky. Ujistěte se, že na tyčince ulpělo vhodné množství stolice. Dostačující je množství velikosti kuličky černého pepře. Nadbytečné množství vzorku může ucpat filtr ve víčku lahvičky. Pozor, řidší vzorky stolice nemusí na tyčince ulpět dobře.
- Tyčinku vsuňte zpět do lahvičky a pečlivě uzavřete víčko. Důkladně promíchejte vzorek v lahvičce s roztokem.
- Lahvičku s odebraným vzorkem uchovávejte vždy v temnu při teplotě 2 - 25°C (např. v lednici).
- Lahvičku doneste svému lékaři nejpozději druhý den po odběru.

HODNOCENÍ LABORATOŘE:

FOB vyšetření:	
datum:	podpis:

GYNEKO spol. s r.o.,
Klinická laboratoř společnostiSmetanova 954, 755 01 Vsetín
IČO: 47681268, Tel.: 571 415 089 - 90